

- **Delta-Dry®** - Almofadamento para gesso sintético, resistente à água
- **Delta-Dry® Softliner** - Manga de malha elástica almofadada resistente à água
- **Delta-Dry® Stockinette** - Manga de malha elástica resistente à água

Utilize apenas produtos resistentes à água em combinação com produtos Delta-Dry®. Os produtos Delta-Dry® estão disponíveis em diferentes larguras e espessuras. Devem ser utilizadas as versões adequadas segundo as instruções do médico.

Delta-Dry® Stockinette:

O Delta-Dry® Stockinette destina-se a ser utilizado em combinação com almofadamento para gesso sintético resistente à água Delta-Dry®, para proteger a pele por baixo de ligaduras de gesso sintéticas.

Escolha a largura adequada da manga da malha elástica, para que se adapte comodamente, mas não aperte o membro do doente.

Corte o tamanho pretendido da manga de malha elástica e puxe a manga por cima do membro do paciente. Não coloque a costura da ligadura tubular Delta-Dry® sobre as proeminências ósseas, com o fim de minimizar o risco de pontos de pressão.

A manga de malha elástica deve alargar, pelo menos, 3 cm além da extremidade pretendida do molde. Estas extremidades dobradas podem ser viradas para trás e presas com a última camada da ligadura sintética.

Para aplicações no braço/pulso, faça um corte para o polegar na manga de malha elástica e passe o polegar através do respectivo orifício. Para aplicações no osso escafóide, aplique também almofadamento Delta-Dry® ou Delta-Dry® Softliner à volta do polegar, para o proteger. Posteriormente aplique as ligaduras sintéticas à volta do membro. Dobre para trás a manga de malha elástica e o almofadamento nas extremidades, antes de fixar com uma camada da ligadura sintética.

Delta-Dry® Softliner:

O Delta-Dry® Softliner destina-se a ser utilizado por baixo de ligaduras sintéticas, para proteger a pele, almofadar o membro e amortecer durante a remoção com serra oscilante. As proeminências ósseas podem necessitar de peças adicionais de almofadamento. Deverão aplicar-se tantas capas da ligadura tubular Softliner o de almofadado como capas se adicionem de ligadura de imobilização, quando se prevê a uma retirada com serra oscilante.

Escolha a largura adequada do revestimento, para que se adapte comodamente, mas não aperte o membro do paciente.

Corte o tamanho pretendido do revestimento e puxe por cima do membro do paciente.

Não coloque a costura da ligadura tubular Delta-Dry® sobre as proeminências ósseas, com o fim de minimizar o risco de pontos de pressão.

O revestimento deve alargar, pelo menos, 3 cm além da extremidade pretendida do molde. Estas extremidades dobradas podem ser viradas para trás e presas com a última camada de ligadura sintética.

Para aplicações no braço/pulso, faça um corte para o polegar na manga de malha suave e passe o polegar pelo respectivo orifício. Para aplicações no osso escafóide, aplique também almofadamento Delta-Dry® ou Delta-Dry® Softliner à volta do polegar, para o proteger. Dobre para trás a manga de malha elástica e o almofadamento nas extremidades, antes de fixar com uma camada da ligadura sintética.

Delta-Dry®:

O Delta-Dry® destina-se a ser utilizado em combinação com Delta-Dry® Stockinette, para almofadar o membro por baixo de ligaduras sintéticas de imobilização e amortecer durante a remoção com serra oscilante. Pode também ser utilizado em combinação com Delta-Dry® Softliner, para almofadar as proeminências ósseas.

Nota: O almofadamento resistente à água é fabricado com adesivo aplicado de um lado. O lado adesivo serve para ajudar a aplicação e deve ser aplicado afastado da pele.

Aplique o almofadado resistente à água Delta-Dry® por cima de Delta-Dry® Stockinette, envolvendo em movimentos espirais e sobrepondo a 50%. Esta técnica cria duas camadas de almofadamento e deverá ser suficiente para a maioria das aplicações. Se for necessário um almofadamento adicional em proeminências ósseas, é preferível aplicar um pedaço cortado do rolo e colocar o lado do adesivo para baixo por cima das duas camadas. Podem ocorrer pequenas pregas ou rugas quando o produto é aplicado. Apenas os vincos maiores devem ser removidos.

Precaução: não estique demasiado o almofadado durante a sua aplicação. Aplique-o, na medida do possível, sem apertar e evitando a formação de rugas. O almofadado aplicado demasiado ajustado pode causar alterações dérmicas durante o uso.

Alargue o almofadamento 2,5 cm além da extremidade pretendida do molde, mas não para além da manga de malha elástica. Estas extremidades dobradas podem ser viradas para trás juntamente com a manga de malha elástica e presas com a última camada de ligadura sintética.

Informação Geral

Instruções de limpeza:

Aconselhe os seus doentes a lavarem regularmente o membro, para uma melhor higiene e um melhor estado da pele. Depois de utilizar o sabão, lave bem com água corrente o interior do molde e seque-o ao ar.



Manga de malha almofadada