

# **HYPAFIX TRANSPARENTE - Dimensões 5 cm X 10 m**

REF: 72378-00 NARTIND: 72378-00000-04

Lote e Validade: Vide Embalagem Notificação ANVISA: 10224000059 Contém: 1 unidade

Composição: Filme transparente de poliuretano e poliéster, papel branco siliconado e adesivo poliacrílico.

INDICAÇÃO: Indicado para a fixação de curativos, drenos, cateteres, dispositivos e outros instrumentos mantendo-os firmes e seguros.

MODO DE USO: Selecione o material adequado para o curativo. Prepare e limpe a pele ao redor da lesão, removendo bem toda a umidade. Aplique o material adequado sobre a área desejada. Selecione o tamanho apropriado de Hypafix Transparente, desenrole a quantidade necessária e corte-a com uma tesoura. Remova o papel protetor da superfície adesiva e aplique a fita sobre o curativo. Deixando uma pequena parte para ser fixada sobre a pele.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO: Vide Embalagem.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Utilizar o produto apenas para a finalidade a que se destina. Não utilizar em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes do produto. Não usar em pacientes com intolerância conhecida a adesivo acrílico. Para uso externo somente em pele intacta. Para fixação somente; não é recomendado para forte apoio.

Produto não estéril

Fabricante recomenda uso único

Fabricado por: BSN Medical GmbH - Quickbornstrasse 24 - 20253 Hamburgo, Alemanha.

Importado e Distribuído por: Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda.

Av. Dra Ruth Cardoso, 8501 - Andar 7 Parte B da Unidade 71 Sala 1 CEP 05425-070 - São Paulo/SP - Brasil

Tel.: +55 11 2141-8100, CNPJ: 54.858.014/0001-70 SAC: 0800 70 45415

Resp. Téc.: Juliana K. Schuh CRF-SP: 65.617

Versão:03 Dezembro/20